



このたびは「凝固剤計量用ポット」をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- 本製品は、「自動ラップポータブルトイレ専用凝固剤」（以下凝固剤）のための計量用ポットです。正しくお使いいただくために、ご利用前に必ず本書と合わせて、凝固剤の袋に記載している警告・注意事項、自動ラップポータブルトイレ本体の取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

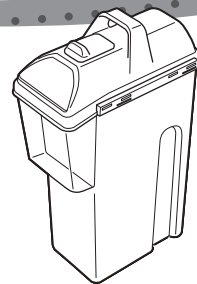

各部の名称

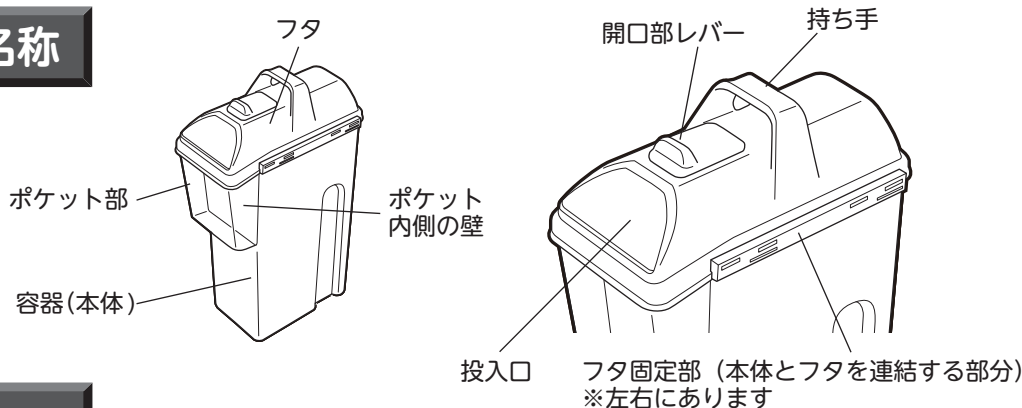

別売品（消耗品）

自動ラップ
ポータブルトイレ
専用凝固剤
(約 60 回分)



仕様

材質（原料樹脂）	フタ：ポリプロピレン、容器（本体）：AS樹脂
重量	約0.4kg
容量	2.4L（凝固剤：約24回分）
サイズ	幅11×奥行19×高さ32cm

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！

凝固剤及び凝固剤を入れた本製品は、お子様や認知症の方の手の届かない場所へ保管してください。凝固剤を誤って食べてしまった場合、すぐに吐かせるなどの処置をして医師の手当てを受けてください。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

！ 必ず行うこと ！

凝固剤が床などに散乱した場合は、速やかに掃除してください。

足を滑らせて転倒する原因になります。

フタ固定部は確実に固定してから使用してください。フタが外れて中身がこぼれたり、フタだけ持った場合に、容器（本体）が外れて落下する可能性があります。

●お手入れ・保管時の注意

- ・直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・お手入れは、中性洗剤を使用し、十分に乾燥させてから使用してください。

⊘ 絶対にしないこと ⊘

容器を落としたり、ぶつかけたり、踏んだりしないようにしてください。破損の原因になります。

使いかた

1. ロックを解除してフタを開け、凝固剤を入れる。

①フタの両サイドにあるフタ固定部を矢印の方向にスライドさせ、フタのロックを解除します。

②フタを上へ持ち上げて外します。

③凝固剤を容器の8割程度まで入れます。

※テーブルの上など、安定した場所で作業してください。

※容器周辺に凝固剤の粉がこぼれることがありますので、新聞紙等を敷いておくと安心です。

※容器に凝固剤を入れすぎると開口部レバーが動かなくなります。入れすぎた場合は、凝固剤の量を減らしてください。


④フタを容器に合わせてかぶせます。

⑤フタの両サイドにあるフタ固定部を矢印の方向にスライドさせ、フタを本体にロックします。

注意



確実に本体とフタが固定されていないと、フタが外れて中身がこぼれる可能性があります。

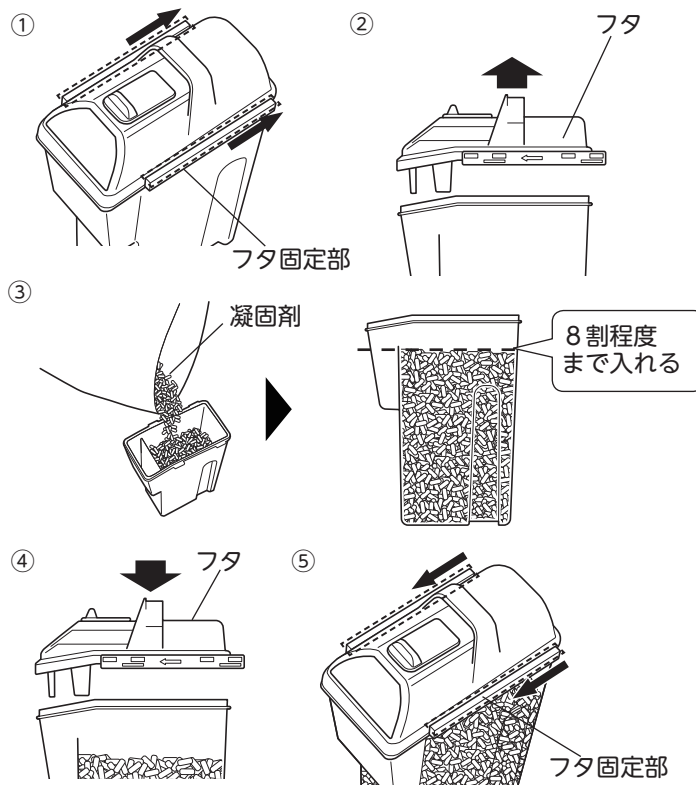

2. 使用する

①容器を傾けて、凝固剤を容器前方のポケット部に集めます。

※凝固剤はポケット部のシールの線を目安に半分程度（ポケット部下端から5cm）まで入れて一回分です。

②開口部レバーをスライドさせて投入口を開け、凝固剤をポータブルトイレの中のフィルムに投入します。

※開口部レバーが動かなくなった場合


凝固剤をポケット部に入れすぎています。

無理に開こうとせずに開口部レバーを元の位置に戻し、凝固剤をポケット部から減らしてください。

③凝固剤投入後は、開口部レバーを逆方向に最後までスライドさせ、投入口を確実に閉じてから、保管してください。

※保管、お手入れの方法は、安全上のご注意を確認してください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

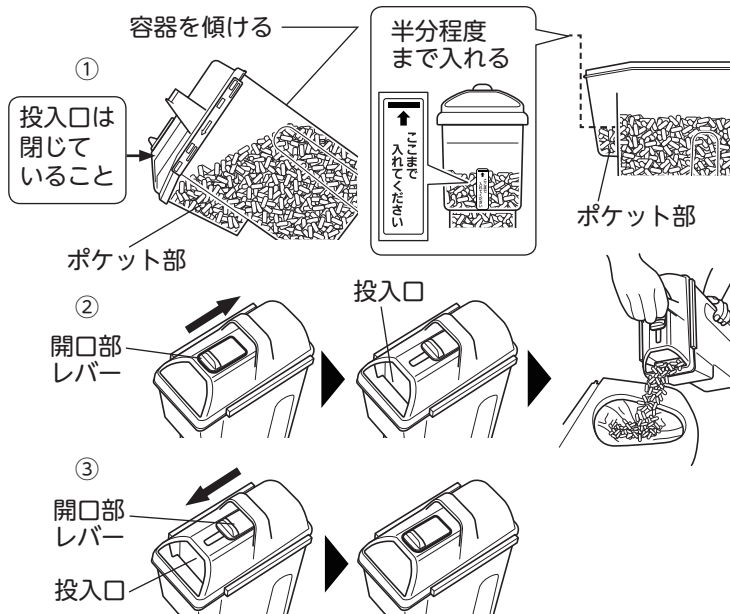

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索