

- 正しくお使いいただくために、ご利用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は、読み終わった後も歩行車「リトルターンⅡ」の取扱説明書と一緒に、いつでも見られる場所に保管してください。

この「GPSホルダーセット」は、歩行車「リトルターンⅡ」専用です。
本製品は、歩行車「リトルターンⅡ」に取り付けて使用する、GPSTラッカーを用い、外出時の位置情報をスマートフォンアプリで確認できる、見守りを補助する製品です。

寸法図・部品構成



GPSホルダー GPSTラッカー

※GPSTラッカーはGPSホルダーに内蔵され、歩行車と一体化しています。

部品仕様

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| ・GPSTラッカー | まもサーチ3（型番:PS-MMS-G01） ※リチウムイオン電池を内蔵 |
| ・GPSホルダー | 材質:ナイロン |
| ・M4六角ボルト | 材質:ステンレス |

廃棄上のご注意

おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

GPS機能について

- ・動作環境範囲は-10℃～50℃です。
- ・ご利用の際は専用アプリ「まもサーチ」のインストールが必要です。
- ・本製品は防犯、事故防止、個人情報取得での使用を意図しておりません。アロン化成株式会社はいかなる責任も負いかねます。また、携帯者の了解を得ない使用は犯罪となる可能性があります。
- ・ご利用環境により電波状況が異なるため、通信の遅延、切断が発生することがあります。ご利用環境の電波状況を十分にご確認のうえ、ご利用ください。
- ・通信事業者の都合（メンテナンス等）により通信機能が一時ご利用になれない場合があります。
- ・バッテリー残量の減り方や電池寿命は使用状況などにより変化します。
- ・本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。

アプリのインストール

お手元のiPhone端末またはAndroid端末で、下記の二次元コードを読み込み、アプリ「まもサーチ」をインストールしてください。

● iPhone端末の場合

<https://x.gd/FU5ov>



● Android端末の場合

<https://onl.bz/jNYcXiS>



初回ログイン方法

- ・アプリのインストールができましたら、起動させてください。
- ・「初めての方」は押さず、「ログイン」をタップしてください。



- ・下記の初期登録情報を入力してログインしてください。

初期登録メールアドレス: [redacted] @aronkasei.co.jp

初期登録パスワード [redacted]

ログイン

メールアドレス

登録したメールアドレスを入力

パスワード

パスワード(6～12文字以内)

ログイン

パスワードをお忘れの場合はこちら

ユーザー登録

●メールアドレスの登録変更

初回ログインでを使用した初期登録メールアドレスから、見守りするご家族様のメールアドレスへ登録内容を変更してください。

「メニュー」→「管理者情報の編集」→「メールアドレス」をタップして変更できます。

管理者情報の編集

ユーザーネーム

みちびぎじょーじ

メールアドレス

mimamori@mamosearch.com

パスワード

●●●●●●

ログアウト

タップ 

<

メールアドレス変更

送信

現在のメールアドレス

mamo@mamosearch.com

新しいメールアドレス

有効なメールアドレスを入力してください

新しいメールアドレスの確認

確認用メールアドレスを入力してください

●パスワードの登録変更

初回ログインで使⽤した初期登録パスワードから登録内容を変更してください。

「メニュー」→「管理者情報の編集」→「パスワード」をタップして変更できます。

管理者情報の編集

ユーザーネーム

みちびきじょーじ

メールアドレス

mimamori@mamosearch.com

パスワード

●●●●●●●●

ログアウト

タップ 

パスワード再設定

保存

現在のパスワード

現在のパスワードを入力してください

新しいパスワード

半角英数字6文字以上12文字以内

新しいパスワードの確認

確認用パスワードを入力してください

アプリの使い方

お手元のiPhone端末またはAndroid端末で、下記の二次元コードを読み込み、アプリ「まもサーチ」のFAQよりご確認ください。

まもサーチ



アプリのサービス契約、通信費用についてはアロン化成株式会社が設定しています。
ご利用者様のお手元では決して変更しないでください。

FAQに記載された、「ご利用開始の手順(メイン管理者の場合)」に沿ってユーザー登録すると、ご利用者様に意図しない契約・課金が発生する恐れがあります。

必ず本書記載の「初回ログイン方法」、「ユーザー登録」に沿って必要情報を登録してください。

充電の仕方



下方にあるUSB Type-Cポートに、市販のUSB Type-Cケーブルを差し込み、USB ACアダプタを用いて充電してください。

充電時間は約3時間です。
出力がDC5Vの1A以上の充電器をご利用ください。
USB Type-CケーブルおよびUSB ACアダプタは付属していません。
なお、急速充電器には対応していません。


1回の充電で連続使用可能な期間は最大で約3週間です。
バッテリー残量の減り方は使用状況などにより変化します。

バッテリー残量は次の方法で確認できます。残量に注意して適宜充電してください。

- ・アプリ画面上のバッテリーアイコンの表示状況
- ・GPSTラッカーのボタンを1回押したときのLEDランプ点灯状況。
(詳細は本ページ「ボタン操作 と LEDランプの見方」)

ボタン操作 と LEDランプの見方

LEDランプは通常、消灯しています。

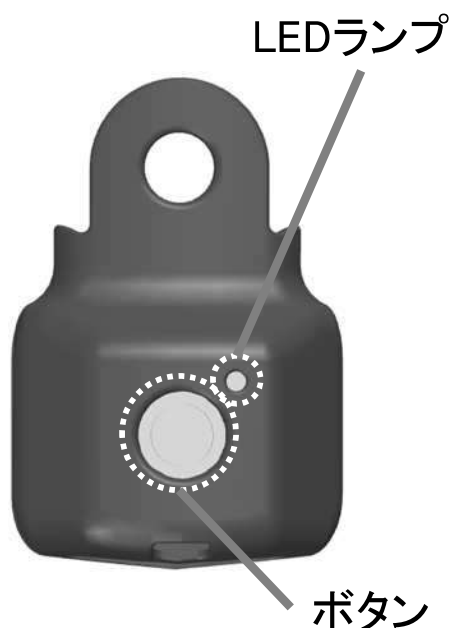

- 電源を入れる : ボタンを4秒長押し
 - ・LEDランプが赤 → 緑 → 青の順に点灯
- 充電時(※残量に関わらず、3時間以上の充電をお勧めします)
 - ・LEDランプが赤 : 充電中
 - ・LEDランプが緑 : 充電完了
- 現在地を発信する : ボタンを3秒長押し
 - ・LEDランプが水色で3回点滅
- バッテリー残量を確認する : ボタンを1回押す
 - ・LEDランプが赤 : 0～20%(※一定間隔で点滅)
 - ・LEDランプが黄 : 21～59%
 - ・LEDランプが緑 : 60～100%
- 通信状態を確認する : ボタンを3回押す
 - ・LEDランプが紫 : ネットワーク圏外 (通信不可)
 - ・LEDランプが白 : ネットワーク探索中 (通信不可)
 - ・LEDランプが水色 : ネットワーク接続完了 (通信可)
- 再起動する : ボタンを15秒長押し
- ファームウェア自動更新
 - ・LEDランプが青 : 数分間素早く点滅しますが、正常動作です。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容です。

思わぬ事故(転倒、けが、破損など)の原因となりますので、必ずお守りください。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

使用時の警告

- ・GPSホルダーを支えにして歩行しないこと。
- ・GPSホルダーを支えにして立ち上がったたり、腰掛けたりしないこと。
- ・ボタン操作やLEDランプ確認の際は、バランスを崩さないようにすること。
- ・強い衝撃を与えないこと。
- ・USBポートに異物が付着したまま充電しないこと。異物は取り除くこと。
- ・修理技術者以外の人が、GPSホルダーおよびGPSTラッカーの取り付け、取り外しを行ったり、分解・修理しないこと。
- ・GPSホルダーおよびGPSTラッカーの改造はしないこと。

使用および保管環境の警告

- ・病院など、電波の使用が禁止されている場所では使用または保管しないこと。
- ・電波の影響を受けるおそれのある医療機器の近くでは使用または保管しないこと。
- ・可燃物があるなど、本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす環境では使用または保管しないこと。
- ・水に濡れた状態、薬品や油が付着した状態で使用または保管しないこと。

異常時の警告

- ・使用中に煙、異臭、異音などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止すること。

注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

使用時の注意

- ・GPSホルダーを持って歩行車を持ち上げないこと。
- ・GPSホルダーを持って歩行車を引き寄せないこと。
- ・充電中は、USB Type-Cケーブルに足を引っかけないように注意すること。
- ・充電完了後は、必ず、USB Type-Cケーブルを取り外してから歩行車を移動させること。
- ・USB Type-Cケーブルに無理な力(テンション)がかかった状態で長時間放置しないこと。

使用および保管環境の注意

- ・以下の環境での使用・保管は避けること。
高温多湿の場所、温度差の激しい場所(結露のおそれがある場所)、ほこりやチリの多い場所、強い振動や衝撃を受ける場所、強い磁気や電磁波を発する機器の近く、車内など高温になる場所
- ・金属や水など電波を遮断するもので覆わないこと。

本書に記載された商標について

- ・iPhoneはApple Inc. の商標または登録商標です。
- ・Androidは Google LLC の商標または登録商標です。
- ・まもサーチはBBSS株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。ただし本文中にはRおよびTMマークは明記しておりません。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
2. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
 - 1) 本保証書のご提示がない場合。
 - 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
 - 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
 - 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、その他の天災地変による故障または損傷。
 - 6) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。本製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。したがって、本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈個人情報の取扱いについて〉

- 1) 本保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、アロン化成株式会社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結びアロン化成株式会社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒 この保証書はご使用できません
★販売店	住 所 〒 店 名 TEL

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索