

# カビ対策




## カビはどうしてできる？

カビは、温度、湿度、栄養、酸素という4つの条件が整うことで発生します。



### カビの発生

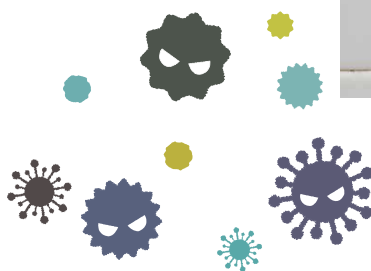

カビは放置しておくとも繁殖を続け、なかなか落とすことができません。  
まず、カビが発生しにくい環境を作ることが大切です。

## カビの予防方法

### 1 熱いお湯

熱いお湯(40℃~60℃)をかけ、湯垢などを溶かします。

(注)やけどには十分にご注意ください。



### 2 冷たい水

次に冷たい水をかけます。熱気がかもらないように冷やします。



### 3 乾燥

最後に水気を拭き取り、直射日光をさけて風通しのよい環境で乾燥させてください。



ソフトパッドにカビが生えてしまったときはどうしたらいい？



一度発生したカビは落とすことが難しいので、別売りのソフトパッドを交換してください。  
※市販のカビ取り剤の使用は控えてください。

ソフトパッドなどの交換部品はこちら






# おそうじの方法 シャワーベンチ編



## 用意する洗剤・道具

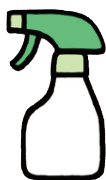

中性洗剤



スポンジ



やわらかい布



歯ブラシ



次の道具、洗剤は製品が劣化するおそれがありますので使用しないでください。

- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等
- 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレンジング剤等
- 消毒用アルコール(エタノール)以外の消毒薬剤



スポンジや、水に濡らして十分に絞ったやわらかい布に、薄めた中性洗剤をつけてそうじしてください。  
水気を拭き取り、風通しのよいところで乾かします。

### ソフトパッド

座面、背もたれのソフトパッドを取り外して表裏を軽く洗い流してください。



### スライド脚

スライド脚のパイプ穴に付着した石けんカスを歯ブラシで取り除きます。



### 脚ゴムの裏面

脚ゴムの裏面は汚れがたまりやすいので、歯ブラシでていねいに取り除きます。




製品内に水がたまっているときはどうしたらいい？



浴室の壁や天井に見られる結露が、シャワーベンチ内部に発生することがあります。座面や背もたれにある水抜き穴を下にして水を抜いてください。

### ●折りたたみシャワーベンチ

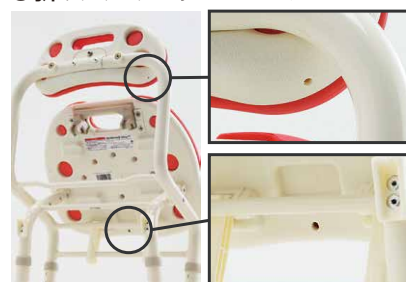

折り畳んだ状態で水が抜ける構造です。

# アロン化成

(お問い合わせは)

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-6 住友不動産日比谷ビル 8階