

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

歩行車 リトルターンII 抑速プラス／歩行車 リトルターン Z 抑速プラス／
歩行車 リトルターン ZT 抑速プラス

LITTLE TURN の抑速機能がリニューアル さらに快適に使いやすくなりました。

動画は
こちらから



便利なトレイ付きもあります

リトルターン ZT
抑速プラス



リトルターンII 抑速プラス



リトルターン Z 抑速プラス

抑速機能とは？

一般的な歩行車



坂道ではハンドルのブレーキをかけながら慎重に歩く必要がありました。

抑速機能があると…



自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行ができます。

一般的な歩行車



利用者によっては歩行車に追いつけずに転倒してしまうこともありました。

抑速機能があると…



急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を予防します。

リニューアルポイント 1

抑速力の設定が

3段階から4段階になり、提案の幅が広がる！

従来品



抑速プラスシリーズ



歩行が比較的安定している方にも使いやすい！

これまでの困りごと

「弱」設定でも意図せず抑速ブレーキが効いて、重たくて歩きにくい…

抑速プラスシリーズ

「微弱」設定にすることで、急加速時など、必要なときに抑速ブレーキがかかる！

リニューアルポイント 2

抑速段階が分かりやすい！

従来品

矢印が抑速段階を表示



抑速プラスシリーズ

色付きの目盛りが抑速段階を表示



黄色い目盛りの数で抑速段階が一目瞭然！

リトルターンIIシリーズ 共通便利機能



調節幅の広いハンドル

製品はコンパクトなまま、ハンドルの高さは74～96.5cm(10段階設定)まで調節できます。1台で幅広の方にお勧めできます。



身長145～185cm(目安)の方で対応

3WAYキャスター

利用者の歩行能力や路面の状況に応じて、**タイヤの首振り設定が3種類**から選べます。また歩行能力の変化によって設定しなおすことで、**長く愛用して頂けます。**



安定

歩行能力

不安

舗装されている

路面状況

凹凸が多い

前腕支持タイプ

リトルターンZ/ZTシリーズ 共通便利機能



狭い廊下でも楽々小回り



最小旋回径
79.9cm

36cm

最小旋回径が79.9cmと小さいため、家の狭い廊下でも小回りが利きます。



回転補助
ローラー

旋回時に壁に当たっても回転補助ローラーが回転を補助するので、狭い場所でも楽に小回りができ、家の中を一人で移動できます。

立ち上がり動作をサポート



立ち上がり補助グリップ

従来までのリトルターンの安定性と、手元の補助グリップで、ベッドや椅子から安定して立ち上がることができます。これによりスムーズに歩行車を使用することが可能です。


福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

歩行車 リトルターン ※「リトルターンZT」は「リトルターンZ」にトレイを付属した商品です。


タイプ	II 抑速プラス	Z 抑速プラス	ZT 抑速プラス
商品コード	532297	532298	532299
価格	99,000円 (税込108,900円)	109,000円 (税込119,900円)	114,000円 (税込125,400円)
カラー	ワインレッド		
商品サイズ	幅50×奥行65×高さ74～96.5cm	幅51×奥行65×高さ87.5～107.5cm	
商品重量	8.8kg	11kg	12kg
材質	(タイヤ)前輪：EVA樹脂、後輪：SBR		
積載荷重	5kg未満	3kg未満	バッグ：3kg未満 トレイ：2kg未満
梱包入数	1		
JAN	255131	255148	255155
TAIS	000740	000741	000742

JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。

▼歩行車 リトルターンII 抑速プラス

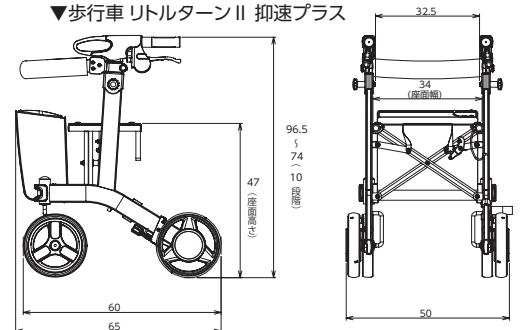

▼歩行車 リトルターンZ・ZT 抑速プラス

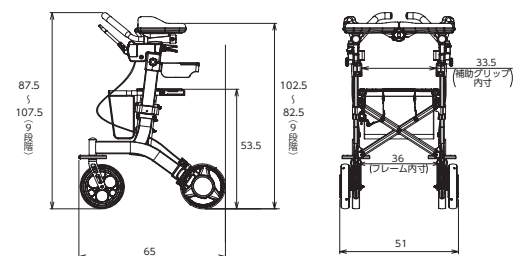

アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。



- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは…