

「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

## 自動計測タイプのデータが活用しやすくなりました！




## NEW 最長で過去4か月分のデータを分析できるようになりました！

### 長期的な排泄データの分析ができる！

アプリで確認できるのは過去1週間分のデータでしたが、CSVでは任意の日から最大で過去4か月分のデータを確認できます。

例えば…

利尿剤服薬前と服薬後のデータを比較する場合、こんなグラフに！

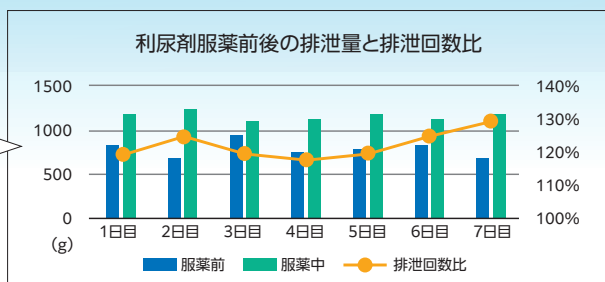

利尿剤の効果で、排泄量・排泄回数が増えているな！

## 定期的な評価で今後のケアプラン立案に役立つ！

施設利用者の皆さんの排泄アセスメントが可能になります！

### 手作業による計測ミスや記録漏れ


排泄量の目視確認と記録作業が手作業なので、ミスをする可能性がある。

### 計測記録業務を効率化し正確な排泄データを取得

正確な排泄データを自動で計測・記録することができます。取得した長期間のデータを定期的に分析活用することで、排泄支援加算の取得に役立ちます。



3月のAさんはお昼にポータブルトイレ、夜はおむつ利用だったけど、4月のAさんはお昼も夜もポータブルトイレ利用になったな！

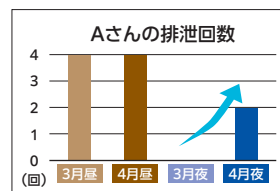

# NEW CSV出力が情報共有や記録作業効率化に役立ちます！

## みんなで共有しやすい！

スマホや専用アプリを持っていない関係者にもデータを共有しやすくなりました。


### 施設内部での連携がとりやすい！

ステーションPCで共有できるから委員会で検討しやすい！



### 施設外部とのやりとりがスムーズ！

施設外の医療機関やケアマネジャー、ご家族などと共有できる！

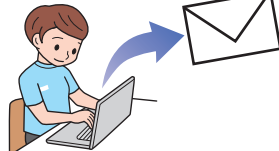


## 介護記録ソフトに転記しやすい！

CSVデータをコピー＆ペーストすることで、介護記録ソフトに簡単に排泄情報の転記が行えます。



※お使いの介護記録ソフトが数値をペーストできるか事前にご確認ください。

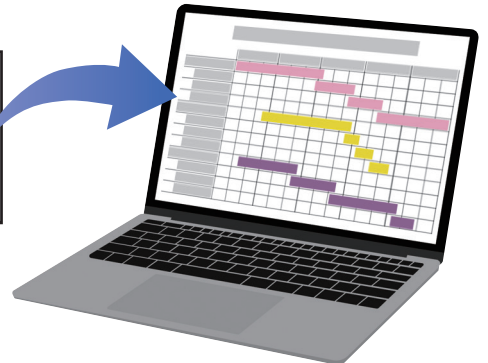

## アプリですぐに情報を確認できます！

### 記録

### 日々の健康状態を記録する


自動的に計測し記録することで、**排せつリズム**・頻尿・便秘・脱水症状などの**健康状態を把握**できます。

#### ■自動で計測できる情報

- 1 排泄重量
- 2 着座時刻
- 3 着座時間



#### ■計測データのグラフ化

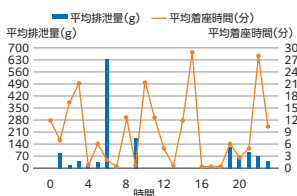

#### ■計測データの一覧表示

| 日付       | 着座時刻  | 着座時間 | 排泄重量  |
|----------|-------|------|-------|
| 10月22日   | 12:13 | 5分   | 400g  |
|          | 10:14 | 15分  | 500g  |
|          | 9:00  | 30分  | 300g  |
| 10月22日合計 | -     | 40分  | 1200g |
| 10月21日   | 15:30 | 14分  | 460g  |
|          | 12:51 | 6分   | 40g   |
|          | 9:30  | 20分  | 510g  |
| 10月21日合計 | -     | 40分  | 1010g |

### 通知

### 見守りや排せつ介助の負担軽減

入所者の着座や離座をプッシュ通知で確認できるので見守りのタイミングを把握できます。

#### ■通知される情報

- 1 着座通知
- 2 離座通知
- 3 長時間着座通知
- 4 バケツ交換通知



#### ■実際の通知内容

通知は右図のようなプッシュ通知が届きます。




安寿花子さんが  
着座しました

安寿花子さんが  
離座しました

安寿花子さんが  
10分以上  
着座しています

バケツ内の  
重量が500gを  
超えました

#### 活用方法

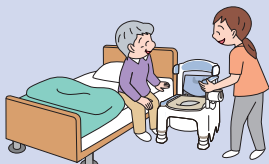

排せつリズムを分析し  
トイレ誘導時間の検討に

#### 活用方法



排せつ情報から排せつ日誌や  
支援加算等の資料作成に

#### 活用方法



着座/離座通知から  
離れた場所でも  
利用状況を確認できる

#### 活用方法



長時間の着座時間通知  
から失神・寝落ちなど  
の気づき

#### 活用方法



排泄重量の通知から  
排せつ物処理の  
タイミングを知る

# アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報には適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



Instagram



YouTube



X



- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…