

ポータブルトイレFX-30自動計測タイプの 通信規格および接続要件

通信機器接続要件	要件	内容
情報通信機器端末との接続要件	Bluetooth® 規格	4.2
無線LANルーターとの接続要件	通信方式	無線LAN通信 (2.4GHz帯)
	無線LAN規格	IEEE 802.11 b/g/n (nは2.4GHz帯のみ)
	IPアドレス設定	DHCPによるIPアドレス取得のみ対応
	認証方式	オープン, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
	ファイアウォール	設定変更が必要になる場合があります

注意事項

ポータブルトイレFX-30 自動計測タイプ (以下、本製品) を無線LAN接続でご利用いただく場合は、「ポータブルトイレFX-30 自動計測タイプの無線LAN接続環境チェックリスト」の要件を全て満たしている必要があります。ご購入前にご確認ください。

※要件の内容についてご不明な点がございましたら、システム管理者またはご契約のネットワーク業者へご相談ください。

施設・医療機関向け 業務用ネットワーク環境 (家庭用除く)

ポータブルトイレFX-30自動計測タイプの 無線LAN接続環境チェックリスト

本製品を設置するネットワーク環境が以下のチェックリストの項目を全て満たしているか、事前にご確認ください。

チェックリストの項目を満たさず、またチェックが付かない場合の対処が困難である場合、本製品をご使用いただけません。

※チェックリストの項目、チェック内容、対処について、ご不明な点がございましたら、システム管理者、またはご契約のネットワーク業者へご相談ください。

項目	チェック内容	チェック欄	チェック欄にチェックが付かない場合の対処方法
DHCP設定	DHCP機能が有効になっているか		DHCP機能を有効にする
無線LAN接続先設定	複数アクセスポイントで同一のSSIDを採用している場合は隣接するアクセスポイント同士でチャンネルが重複していないか		電波調整機能 (例: 自動チャンネル選択や電波強度調整) を有効にする 電波調整機能がない場合は、隣接するアクセスポイント同士のチャンネルが重複しないように、1ch/6ch/11chなどの非重複チャンネルを割り当てるとともに、手動で電波干渉しないように電波強度を調整する

<<裏面に続く>>

ポータブルトイレFX-30自動計測タイプの 無線LAN 接続環境チェックリスト

項目	チェック内容	チェック欄	チェック欄にチェックが付かない場合の対処方法
無線LANの周波数	2.4GHz帯 (IEEE 802.11b/g/n) が全て有効になっているか ※5GHz帯および2.4GHz帯のa/axは対応していません		2.4GHz帯 (IEEE 802.11 b/g/n) を全て有効にする
セキュリティ (認証) 方式	オープン, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSKのいずれかの方式が有効となっているか		オープン, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSKのいずれかの方式を有効にする
	MFP (管理フレーム保護機能) が無効となっているか		MFP (管理フレーム保護機能) を無効に設定する
SSID名称	全角文字 (漢字、ひらがな、全角英数字、全角記号)、半角カタカナ、スペース (半角・全角)、“ (ダブルクォーテーション)、¥ (円マーク)、, (カンマ) が含まれていないか		半角英数字および半角記号 (“ (ダブルクォーテーション)、¥ (円マーク)、, (カンマ) を除く) の名称に変更する
SSIDのパスワード	63文字以下の、? (クエスチオンマーク) およびスペース (半角) を除いたASCII文字列になっているか		63文字以下の、? (クエスチオンマーク) およびスペース (半角) を除いたASCII文字列に変更する
アクセスポイントへの接続台数	アクセスポイント (無線LANルーター等) への接続台数が許容上限内であるか		接続台数が上限に達している場合は、アクセスポイント (無線LANルーター等) の増設または、より多台数に対応したアクセスポイントへの変更をおこなう
IPアドレス数	稼働台数分のDHCP配布IPアドレスを確保できているか		DHCP配布IPアドレスを本製品の稼働台数分以上を確保する
MACアドレスフィルタリング	MACアドレスフィルタリング機能が無効になっているか		MACアドレスフィルタリング機能を無効にするか、本製品のMACアドレスを許可リストに登録する
ゲスト無線LAN設定	無線LAN接続時に情報機器端末 (スマートフォン等) から利用規約の承認や追加認証なしで接続できる設定になっているか		情報機器端末 (スマートフォン等) からの利用規約の承認や追加認証を不要とする設定へ変更する
ファイアウォール	UTMを使用していないか		UTMを使用している場合は、本製品がインターネット接続で遮断されない設定か確認する ※詳細な設定方法については、ご利用のUTM製品のマニュアルやサポート窓口にて確認ください

Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、アロン化成株式会社はこれらのマークのライセンスに基づいて使用しています